

Presso Massaggio



FUNZIONI

-Presso-Massaggio

Questo apparato è stato progettato con attenzione secondo le ricerche di bionica umana, rottura del grasso, grasso dissolto, drenaggio linfatico, terapia magnetica e usa mezzi di alta tecnologia per massaggiare, questo fa sì che il massaggio ad aria dia un significativo effetto.

Dimagrimento

- ⊙ Le sacche d'aria vengono gonfiate e sgonfiate regolarmente con pressione regolabile questo dissocia e spacca le cellule di grasso.

Rilassamento

- ⊙ La circolazione sanguigna sarà accelerata ed il muscolo diminuirà dopo che le micro correnti avranno lavorato nel corpo.

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio Presso-Massaggio:

Apparecchio azionato da un'elettropompa che immette aria in cuscinetti di varie forme e dimensioni che, a loro volta, vengono applicati liberi o inseriti in appositi contenitori di tessuto, plastica o altro materiale idoneo.


La regolazione della pressione di massaggio viene effettuata tramite regolatore di flusso e limitata automaticamente ad un massimo di 100kPa.

L'apparecchio è dotato, inoltre, di dispositivi di regolazione della durata dell'emissione di pressione, della pausa, nonché di un'eventuale sequenza di programma sui diversi cuscinetti.


Alimentato a corrente di rete.



Collegare i tubi e i cavi prestando attenzione ai numeri delle uscite !

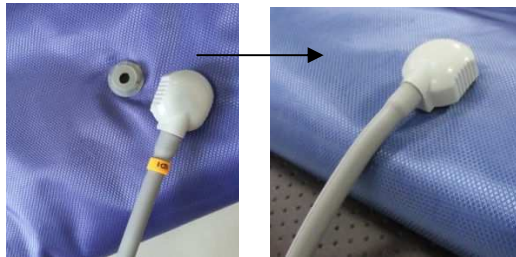

Dettagli Connessioni

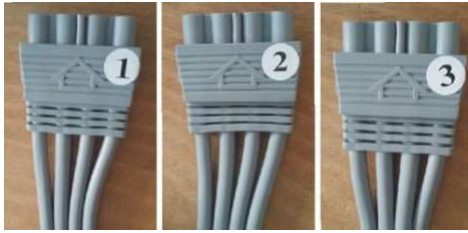

Tubi Presso

Interruttore
Acceso/Spento

Fusibile

Alimentazione



Pannello Posteriore

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Accendere l'apparecchiatura.
3. **Massaggio ad Aria**

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

I cuscinetti vengono applicati sulle parti da trattare, per effettuare un massaggio con pressione alternata, sequenziale, od altro sostitutivo del massaggio manuale.

Rispettare i tempi, le pressioni e le frequenze di trattamento secondo le indicazioni fornite in fase di installazione.

Non usare in soggetti con fragilità capillare, ipertensione arteriosa o cardiopatie.

AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

The control panel features a central human figure with numbered callouts (1-9) pointing to specific body areas. The panel includes several functional buttons and a numeric keypad.

- Left Column:** Three large buttons labeled "Pressotherapy" (pink), "Far Infrared", and "E.M.S.".
- Top Row:** A row of seven numeric buttons (0-7) on the left and two on the right (8, 9). Each button has up/down arrows and "00" in the center.
- Bottom Row:** A row of four buttons: "time" (00:00), "mode" (A), "level" (.), and a Start/Stop button (play/pause icon).

Callout boxes on the right side of the panel:

- Box 1 (pointing to button 8): "Secondi di gonfiaggio per ogni settore"
- Box 2 (pointing to button 5): "Attiva Disattiva settori"

Labels at the bottom of the panel:

- Regolazione Tempo (under time button)
- Modo d'uso (under mode button)
- Regolazione Pressione (under level button)
- Start / Stop (under Start/Stop button)

Ci sono 4 modalità di gonfiaggio:

Modo A:

Gonfia i settori da 0 a 9, sgonfia 0 quando gonfia 1, sgonfia 1 quando gonfia 2.....così fino a 9, poi gonfia tutti i settori da 0 a 9 insieme, poi ricomincia.

Modo B:

Gonfia i settori da 0 a 9, sgonfia 0 quando gonfia 2, sgonfia 1 quando gonfia 3.....così fino a 9, poi gonfia tutti i settori da 0 a 9 insieme, poi ricomincia.

Modo C:

Gonfia i settori da 0 a 9, mantiene gonfio 0 quando gonfia 1, mantiene gonfio 0 e 1 quando gonfia 2, mantiene gonfio 0, 1 e 2 quando gonfia 3, mantiene gonfio 0, 1, 2, e 3 quando gonfia 4.....così fino a 9, poi ricomincia.

Modo D:

Gonfia 3 linee allo stesso tempo

“0” → “1” → “2” → “3” → “4” → “5” Gambe

“6” → “7” → “6” → “7” → “6” → “7” Addome

“9” → “8” → “9” → “8” → “9” → “8” Braccia

Poi ricomincia.

E' consigliato l'utilizzo del Modo C all'inizio del trattamento e poi commutare con altro modo d'uso

CONTROINDICAZIONI GENERALI

1. Persone con emofilia
2. Persone con pacemaker
3. Persone con malattie cardiovascolari
4. Persone con allergie alla pelle
5. Persone con febbre alta
6. Donne in gravidanza

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE.....: 230V / 50Hz

DIMENSIONI:Corpo Macchina: 46 x 55 x 10 (cm)

Insieme Tuta: 91 x 46 x 12 (cm)

PESO:..... Corpo Macchina: 5 kg.

Insieme Tuta: 6.6kg

CONSUMO.....: 350W

PRESSIONE MAX Presso-Massaggio...: 100kPA